


## Réduisez les pertes de porcelets ne pouvant se déplacer et s'alimenter

### Principe

Dispositif élastique permettant de corriger un problème de splayleg à la naissance du porcelet. Il est très important de placer le SPLAYLEGSTOP le plus tôt possible. La peau du porcelet doit être bien sèche et propre pour que le SPLAYLEGSTOP adhère bien à son dos. Attendez quelques minutes de façon à ce que le porcelet s'habitue.

**SPLAYLEG STOP**

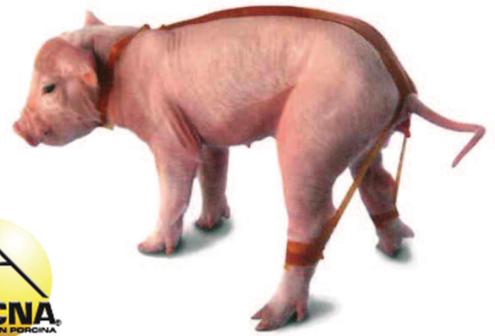


Conditionnement : boîte de 10 unités



1 • Retirer le film protecteur de la partie inférieure pour les pattes.



2 • Entourer doucement la patte du porcelet avec la bande.

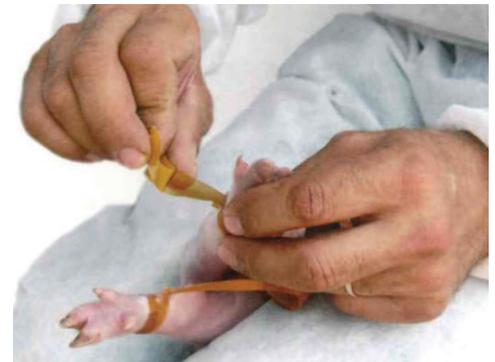

3 • Faites de même avec l'autre patte et assurez-vous qu'elles adhèrent correctement à la peau du porcelet.



4 • Tendez les bretelles de façon à ce que les pattes du porcelet soient bien tirées par l'arrière.



5 • Faites passer l'union du SPLAYLEGSTOP au dessus de la queue de l'animal.



6 • Assurez-vous que la bretelle adhère bien au dos de l'animal.



7 • Faites passer la bretelle par le cou de l'animal.



8 • Laissez l'animal debout quelques minutes pour qu'il trouve son équilibre.